

Miele

E R G O N O M I S K X
C U B E X E C O D R Y
T I D S S P A R A N D
E S Ä K E R X W I F I
N Y H E T **E N K E L T**
H A N D H A V A N D E
C U B E E F F E K T I
V X X I N T U I T I V
N A V I G E R I N G X
E K O N O M I S K X X
T O U C H S K Ä R M X




Cube och **Cube X** De nya små autoklaverna

Miele Professional. Immer Besser.

C U B E
C U B E X



STERILISERING MED SYSTEM

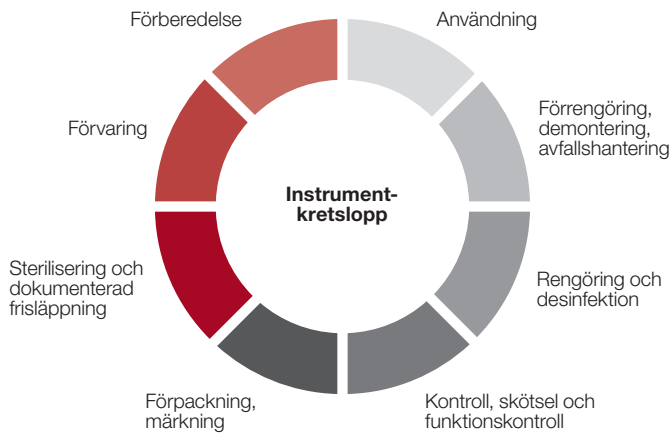

Innovativt, effektivt och allt i ett system

Med de nya produktnyheterna Cube och Cube X utökar Miele sin integrerade systemlösning System4Med med två kraftfulla små autoklaver som garanterar en säker och tillförlitlig sterilisering av medicinska instrument på kort tid. Mottagningar av olika storlek kan på detta sätt göra stora tids- och kostnadsbesparingar som inte bara optimerar instrumentkretsloppet, utan även hela det administrativa arbetet.



MER SÄKERHET MER EFFEKTIVITET



Med kortare programtider, en innovativ torkteknik och en intuitiv navigering uppfyller Cube och Cube X de högsta kraven gällande säkerhet, användarvänlighet och ekonomisk användning i det dagliga arbetet på mottagningen. Båda modellerna imponerar med optimala torkresultat, en touch-färgdisplay för enkel styrning och en enkel integrering i alla typer av IT-system.

För stora och små mottagningar. Miele erbjuder två modeller med olika storlekar på kammaren för att uppfylla olika krav som medicinska enheter har. Performancemodellen Cube har redan har alla funktioner för snabba och tillförlitliga steriliseringsprocesser i moderna mottagningar. Premiummodellen Cube X har i sin tur ytterligare innovativa tillvalsfunktioner som garanterar ett effektivt instrumentkretslopp på högsta tekniska och ekonomiska nivå.

PERFORMANCEMODELL CUBE FÖR ETT EFFEKTIVT INSTRUMENTKRETSLOPP

Enkelt, tillförlitligt och effektivt. Modellen Cube imponerar med korta programtider, optimala torkningsresultat och låga förbrukningsvärden. Den kompakta autoklaven har många praktiska funktioner för effektiva steriliseringsprocesser. Den finns med två olika storlekar på kammare (17 och 22 liter) och optimerar som den centrala delen av en omfattande systemlösning hela instrumentkretsloppet på små till medelstora mottagningar.

- Praktiska programinställningar, exempelvis programmerbara programstarter
- Användarvänlig styrning
- Modern touch-färgdisplay
- Ergonomisk design
- Fullständig processdokumentation
- Wifi-anslutning (som tillval)



KRAFTFULL
FÖR SMÅ OCH STORA
MOTTAGNINGAR

PREMIUMMODELL CUBE X ÖVERTRÄFFAR DE HÖGSTA KVALITETSKRAVEN

Innovativ, snabb och säker. Premiummodellen Cube X underlättar arbetsprocesserna i mottagningar och på sjukhus med korta programtider, en högmodern torkteknik, en enkel användning och programmeringsbara programstarter. Maskinen finns med två olika storlekar på kammaren (17 och 22 liter), har en toppmodern nätverksteknik och dessutom ett stort antal extrafunktioner, som garanterar mer komfort och ekonomisk användning i det dagliga arbetet på mottagningar.



- Förkortade programtider tack vare EcoDry-teknik
- Individuell användarregistrering
- Snabbprogram för oförpackade instrument
- Praktiska programinställningar, till exempel programmerbara programstarter
- Användarvänlig styrning
- Modern touch-färgdisplay
- Ergonomisk design
- Fullständig processdokumentation
- Wifi-anslutning (tillval)
- Modernt underhållsstöd via 3D-animering på maskindisplayen



KVALITET OCH SÄKERHET

Tillförlitlig sterilisering av instrument

Säkert programval

Individuella steriliseringsprogram
Säker steriliseringsprocess med standard klass B-program ett klass S-program (modellberoende) samt relevanta testprogram som vakuumtestet.

Praktiska programinställningar

Individuell flexibilitet
Värdefull kostnads- och tidsbesparing i det dagliga arbetet på mottagningar tack vare individuella programinställningar som till exempel programmeringsbara programstarter.

Fullständig processdokumentation

Säker dataöverföring
Enkel spårbarhet tack vare automatisk lagring av dokumentation på USB-minne. Streckkodsetiketter kan enkelt skrivas ut med Miele's etikettskrivare APH 550 Sego.

Individuell användarregistrering

Digital identifikation
Efter önskemål kan användarna av Cube X som kontrollerar och frisläpper steriliseringsbatchar dokumentera dem digitalt. Förutom bekräftelsen av frisläppningen kan namnet på användaren sparas.

För mer information om fördelar och funktioner, gå till: miele.se/professional





EFFEKTIVITET OCH KOMFORT

Mer ekonomisk användning i vardagsarbetet

Optimerade programtider

EcoDry-teknik

Cube X imponerar med kortare programtider, en längre livslängd hos instrumenten och en stor besparing av energi. Med hjälp av den patenterade EcoDry-tekniken anpassas torktiden till batchmängden.

Kompakta mått

Ergonomisk design

Maskinernas ergonomiska design ger en extra komfort. De kompakta måtten gör att maskinerna kan integreras optimalt i alla utrymmen.

Enkel användning

Intuitiv touch-färgdisplay

Den stora touch-färgdisplayen och en intuitiv menystruktur gör teamets dagliga arbete enklare, snabbare och effektivare.

Enkel dataöverföring

Wifi-Dongle-Key

Som tillval kan du välja att ansluta via wifi. På detta sätt kan datan enkelt föras över till andra programvarusystem.

Hög komfort

Automatisk vattenpåfyllningsventil

Förutom en enkel manuell påfyllning av vattenbehållaren kan autoklaverna enkelt anslutas till Miele Plug & Pure- vattenrengöringssystem.



**STÖRRE EFFEKTIVITET
I DET DAGLIGA ARBETET
PÅ MOTTAGNINGEN**



TVÅ MODELLER FÖRSTKLASSIGA RESULTAT

		Cube		Cube X	
		17 liter PST 1710	22 liter PST 2210	17 liter PST 1720	22 liter PST 2220
Kapacitet					
Instrument		4,5 kg	5,5 kg	4,5 kg	6 kg
Textilier		1,5 kg	2 kg	1,5 kg	2 kg
Kassetter, container		9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Program och styrning					
121 °C Universal Hålltid: 20,5 min*	tom	65	66	35	35
	full kapacitet	74	77	62	67
134 °C Universal Hålltid: 5,5 min*	tom	44,5	45,5	22,5	22,5
	full kapacitet	54,5	59,5	42,5	46,5
134 °C Prioner Hålltid: 20,5 min*	tom	60	61	38	38
	full kapacitet	70	75	59	63
Snabbprogram Hålltid: 3,5 min	tom	–	–	13	13
	2 kg	–	–	20	21
Vakuumtest		19	20	17	18
Helix-B&D-test		23	24	21	21
Anslutningar		2 x USB	2 x USB	5 x USB, 1 Ethernet	5 x USB, 1 Ethernet
Mått och vikt					
Yttermått H/B/D		452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm	452 x 465 x 634 mm
Tomvikt		42,5 kg	44,0 kg	46,0 kg	47,5 kg
Storlek kammare		Ø: 250 mm x D: 362 mm	Ø: 250 x D: 440 mm	Ø: 250 x D: 362 mm	Ø: 250 x D: 440 mm
Elektrisk anslutning					
Strömförsörjning		200– 240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200– 240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200– 240 Vac, 50/60 Hz, 10 A	200– 240 Vac, 50/60 Hz, 10 A
Anslutningseffekt		2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW	2,0–2,4 kW
Normöverensstämmelse		93/42/EWG, 2014/68/EU, 2012/19/EU, DIN EN 13060, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN 61770			
Leveransinnehåll		3 x aluminiumbrickor för Cube/5 x aluminiumbrickor för Cube X, vridbar brickbärare, brickhållare,			

*Programtider kan variera beroende på typ av diskods, torktid samt el- och vattenförsörjning.



STERILISERING MED HELHETSTÄNK

Kraftfulla maskiner, specialanpassade processkemikalier, toppmoden programvara och högsta servicekvalitet – med System4Med erbjuder Miele Professional ett innovativt helhetssystem för säker och effektiv hantering av instrument. De nya autoklaverna Cube och Cube X är perfekt anpassade till systemomgivningen och garanterar en friktionsfri, materialskonande och ekonomisk sterilisering av medicinska instrument. Sjukhus och mottagningar får på detta sätt en lösning i fyra nivåer, som optimerar såväl processkretsloppet som det administrativa arbetet.





- **Preparering, desinfektion och sterilisering**
Kraftfulla små autoklaver för snabb och säker sterilisering av alla instrument.
- **Processkemikalier**
Perfekt anpassade processkemikalier för en grundlig och skonsam rengöring av alla instrument
- **Processdokumentation**
Intelligent programvara för dokumentation som ger en fullständig och löpande övervakning av processerna
- **Service**
Högsta Miele-kvalitet även när det gäller rådgivning, finansiering, service och validering

Miele AB

Immer Besser

Ända sedan 1899 har Miele varit familjeägt och haft Immer Besser som motto. Dessa ord betyder kvalitet, hållbarhet och innovationskraft för ett märke med stämpeln "Made in Germany". Ord som gör att professionella användare kan känna sig säkra på att de har valt rätt produkt.

Utmärkelser

Kompromisslös tillförlitlighet till produkten och service är anledningarna till att användarna om och om igen väljer Miele till det bästa och mest förtroendeingivande märket. Välkända utmärkelser som MX Award, iF och reddot Design Awards och det tyska hållbarhetspriset bevisar Mieles goda ställning när det gäller design, kvalitetsmanagement och skonsam resurshantering.

Kompetent

Miele Professional utvecklar och producerar sedan länge högkvalitativa tvättmaskiner, diskmaskiner, laboratoriediskmaskiner, diskdesinfektorer och autoklaver. Noga anpassat tillbehör, rådgivning och en kunnig servicepersonal gör att Mieles maskiner alltid kan prestera optimalt och effektivt.